


SurgiTel[®]

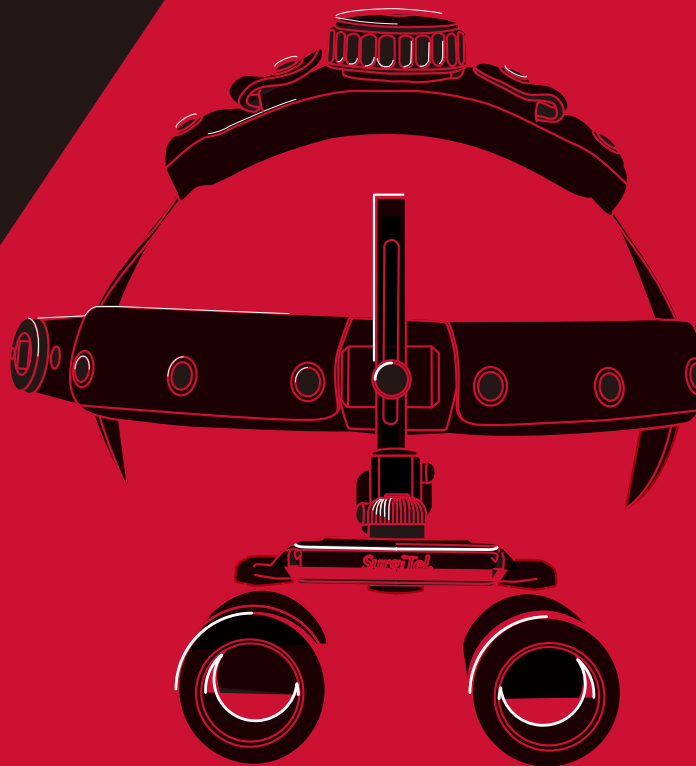

サージテル ヘッドバンドタイプ ユーザーズガイド

 Oral Care

このたびは、サージテル製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

- ご使用の前に必ずこの『ユーザーズガイド』をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
- 本書は、製品と一緒に大切に保管してください。

このガイドでは誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
次の表示で区分して説明しております。



禁止

製品の取り扱いにおいてその行為を禁止。



注意

誤った取り扱いをしたときに、
故障・損傷または事故・怪我
に結びつくもの。

目次

サージテル ヘッドバンドタイプ ユーザーズガイド

| | | |
|--------------|--------------------------|----|
| 禁止事項 | 4 | |
| 注意事項 | 5 | |
| 各部の名称 | 6~7 | |
| 使い方 1 | ヘッドバンドの調整と 拡大レンズの取り付け | 8 |
| 使い方 2 | クランプ部のネジの役割と ルーベの角度調整 | 9 |
| 使い方 3 | ルーベの高さを調整 | 10 |
| 使い方 4 | ルーベの瞳孔間の調整 | 11 |
| 使い方 5 | フリップアップバドルの使い方 | 12 |
| 主な消耗部品・アクセサリ | 13 | |
| 修理連絡先・修理品送付先 | 14 | |





SurgiTel 保証書 15

保証規約 16




禁止

- 水洗いをしないでください。中に水が入り、曇りの原因となります。
- アルコールや酸・アルカリ等の洗浄剤を使わないでください。コーティング剤が剥がれる原因となります。
- 殺菌灯、オートクレーブ等を使つての消毒・滅菌・殺菌も避けてください。劣化や損傷につながります。
- 角度を調整する際は、瞳孔間距離調整ネジ周辺を持って調節してください。鏡筒を持って動かすと、視野がずれて二重に見えたりする原因になります。

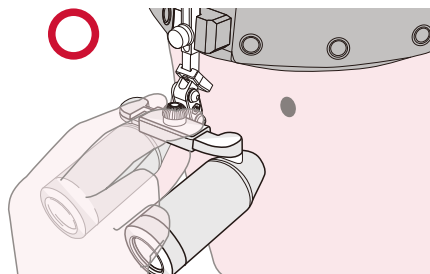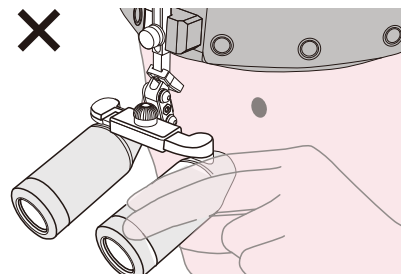


注意

- エアコンの吹き出し口付近等、極端に高温または低温(40度以上または5度以下)になる場所に置かないでください。鏡筒内に結露が生じたり劣化の原因になります。
- 作業距離微調整キャップ(EVKシリーズ)を正面から押さないでください。キャップレンズ脱落の原因となります。
- ルーペを通して太陽を見ないでください。
- 分解・改造および弊社指定機関以外で修理された製品の故障または損害について、弊社は一切責任を負いかねます。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

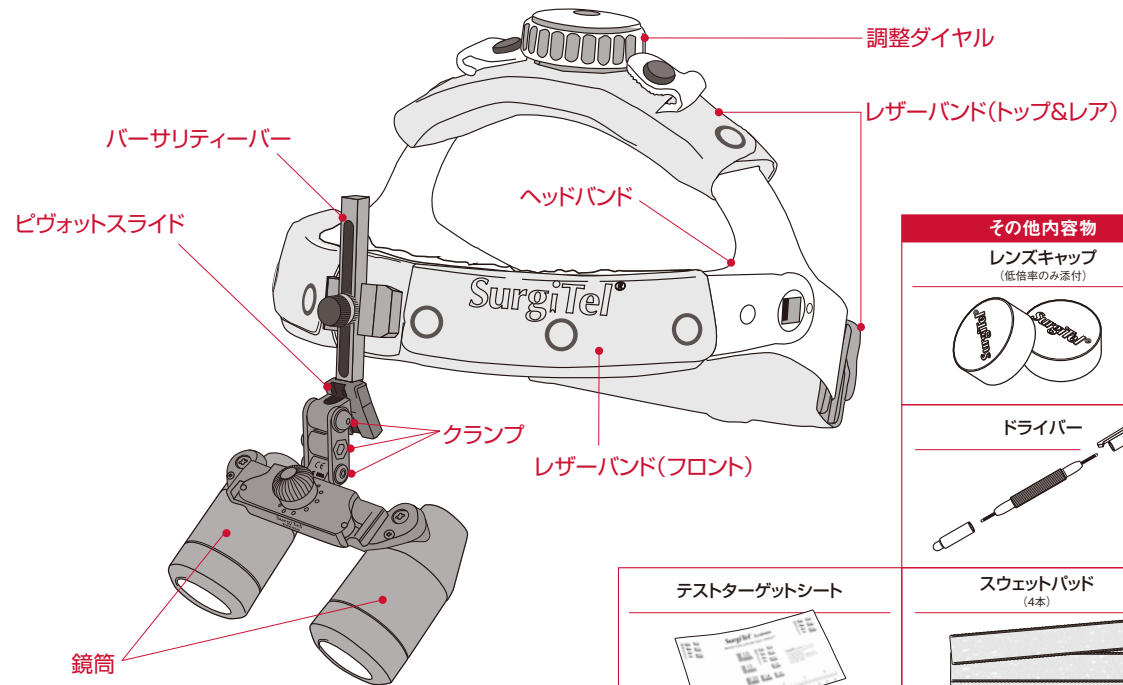

| その他内容物 | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| レンズキャップ (低倍率のみ添付) | | |
| | | |
| ドライバー | | |
| | | |
| スウェットパッド (4本) | | |
| | | |
| テスターゲットシート | フリップアップパドル (はね上げ用ヘラ) | |
| | | |
| 六角レンチ (1/16インチ) | 清掃用クロス | |
| | | |

梱装箱を開いたら、付属品がそろっていることをご確認ください。


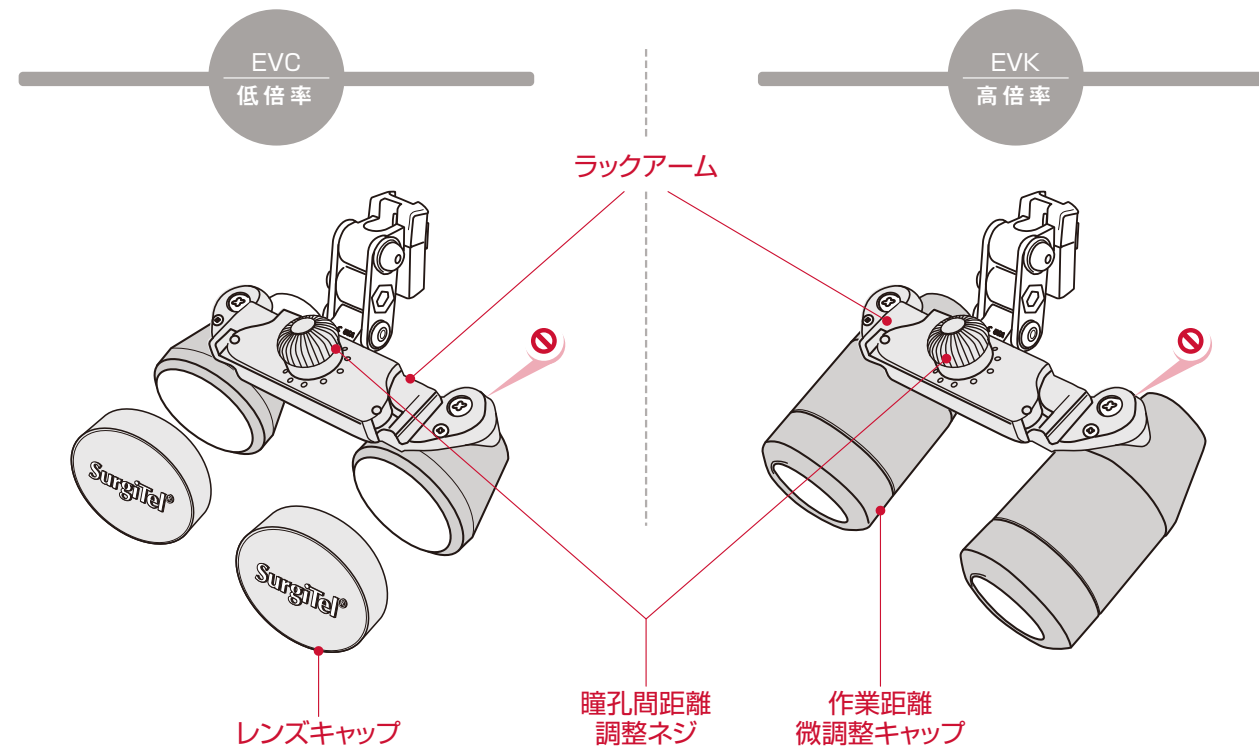


禁止 この部分は接着剤で固定されています。無理に動かさないとください。

1 ヘッドバンドの調整と拡大レンズの取り付け


後頭部と頭頂部の2ヶ所のダイヤルを回し、頭からずれないように調整します。ダイヤルが固い場合には、ダイヤルのネジを回して調節してください。

※ネジを締めすぎるとダイヤルが動かなくなるので、締めすぎないようにしてください。

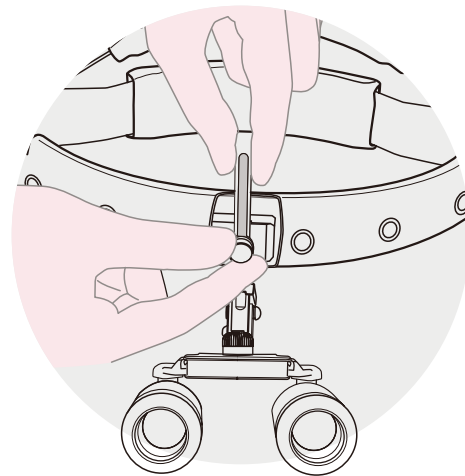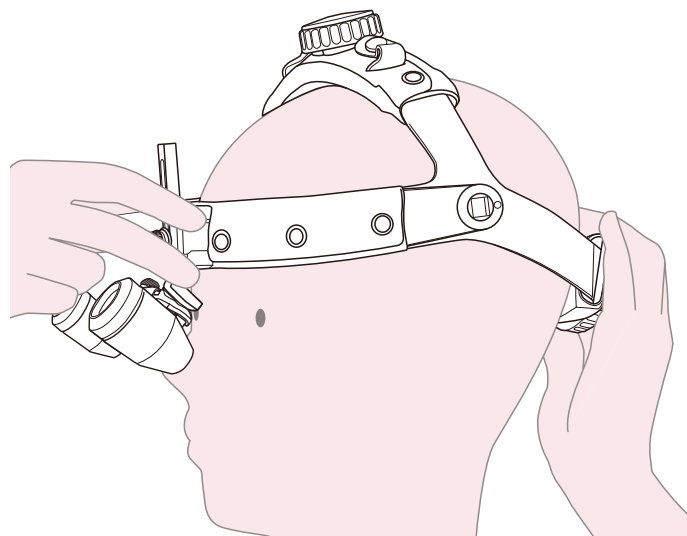

ヘッドマウントのフロント凹部にルーペのバー部分を取り付け、ネジで固定します。高さを調節 (P10参照) するときにはバーの位置を変更するので、このネジは少し緩めた状態にしてください。

2 クランプ部のネジの役割とルーペの角度調整

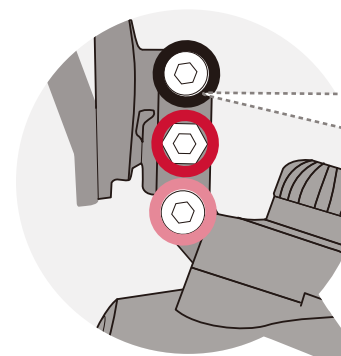

● 上のネジ→

締めすぎるとフリップアップ (はね上げ) できなくなります。少し緩めた状態に調整してください。


● 中央のネジ→

フリップアップの固さを調節します。拡大鏡の上げ下げが適切な固さになるように、このネジで調節してください。

● 下のネジ→

緩めるとクランプ部と拡大鏡の角度を調整できます。拡大鏡の角度調節が完了したら、このネジを締めて固定してください。


六角レンチ

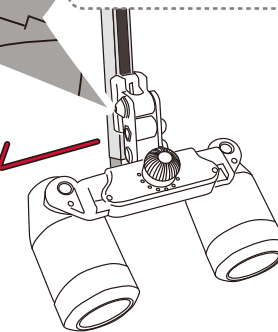

POINT




ルーペが目から離れると、拡大視野の見える範囲が狭くなります。できるだけ目に近づけてください。

視線を下に向けて口腔内が見えるようにルーペの角度を調整します。次ページの高さ調整と一緒に進むと、視野を合わせやすくなります。

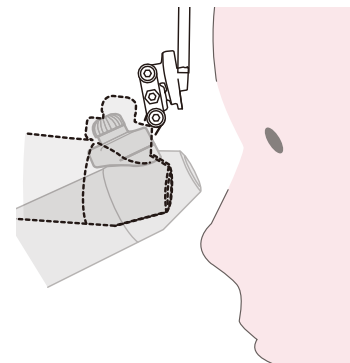

3 ルーペの高さを調整




斜め下を見ながら、ルーペを通して拡大視野が得られる位置に調節します。

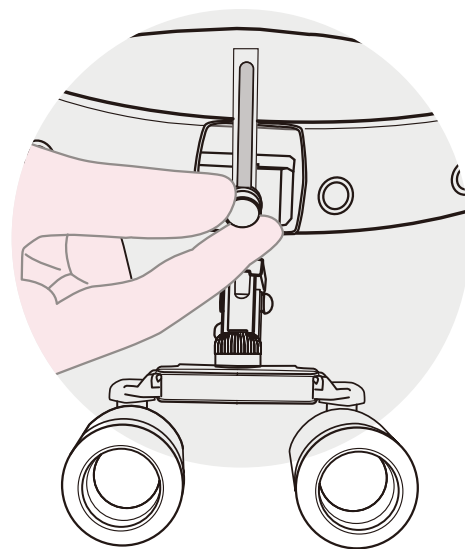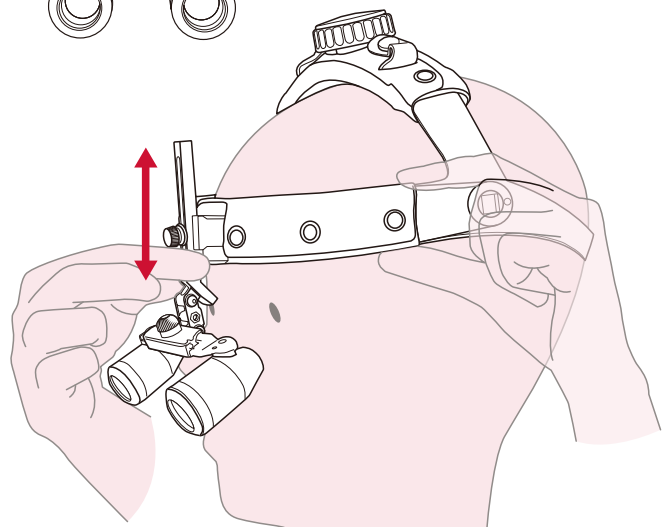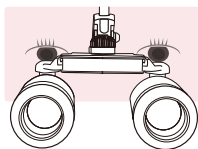

ルーペの高さ調節が完了したら、ネジを最後まで締めて高さを固定します。

4 ルーペの瞳孔間の調整

テストターゲットシートを見て、左右の視野が下図のように半分～2/3程度に重なった状態に見えるか確認してください。適切な視野で見ることができない場合は、瞳孔間距離調整ネジを回して適切な視野になるように調整してください。

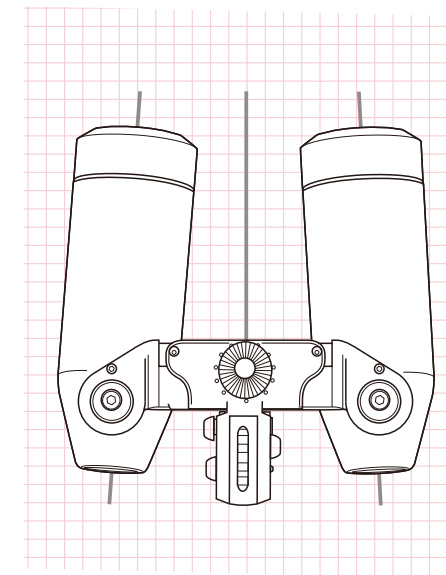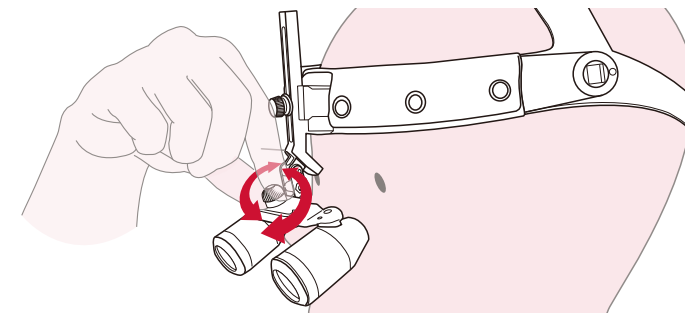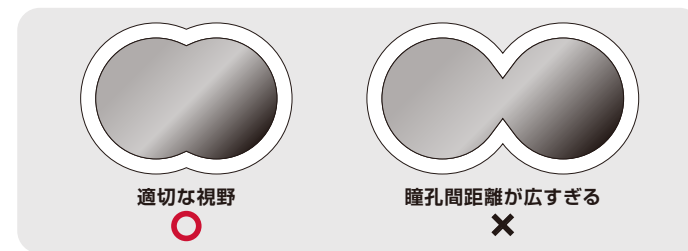


鏡筒の角度は左右対称ではありません。焦点深度を確保するため、レンズ工学に基づき計算された角度となっています。


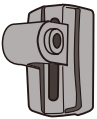





禁止 鏡筒は固定されていて左右に動かしたりできません。無理に曲げたりすると破損の原因となります。

5 フリップアップパドルの使い方

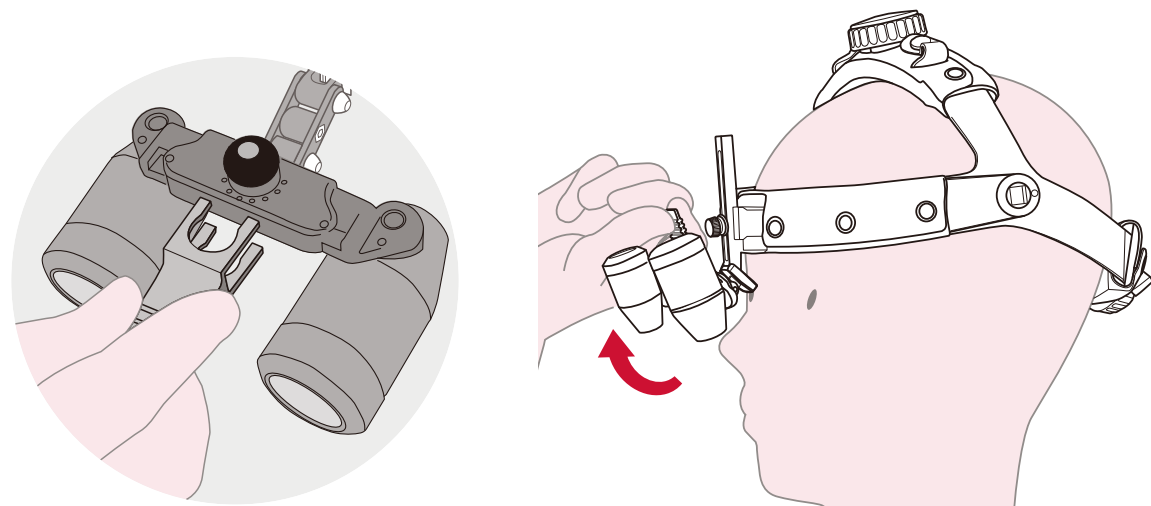フリップアップパドルはルーペの中央部分にはめ込みます。
フリップアップパドルを活用することで、ルーペに触れることなくレンズを上げ下げできます。

※ライト装着時には使用できません。

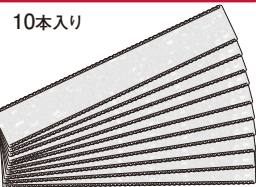

| | | |
|--|---|--|
| <p>フロント/トップ&レア セット</p>  | <p>ビョットスライド</p>  | <p>フェイスシールド</p>  <p>ヘッドバンド用</p> |
| <p>作業距離微調整キャップ</p> <p>低倍率用</p>  | <p>高倍率用</p>  | <p>レンズガード(低倍率用のみ)</p>  |
| <p>スウェットパッド</p> <p>10本入り</p>  | | <p>●ご注文は、同封の『リフレッシュパーツオーダーシート』をご利用ください。</p> |

【保証期間内】

株式会社オーラルケア サージテル修理チーム

〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西4-21-3

Tel: 0120-149-386 Fax: 0120-449-386 Mail: surgitel_repair@oralcare.co.jp

【保証期間終了後】

株式会社マグニファイ・フューチャー・コミュニケーション サージテルリペアサービス

〒125-0062 東京都葛飾区青戸5-9-6-102

Tel: 03-6662-4901 Fax: 03-6662-4903 Mail: surgitel-repair@mf-communication.com

株式会社オーラルケア サージテル カスタマーセンター

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-32-9 ☎0120-149-386 ☎0120-449-386 surgitel@oralcare.co.jp

 Oral Care
https://www.oralcare.co.jp

SurgiTel® 保証書

ご購入医院名

お名前

製品出荷日

年

月

日

保証期間 1年 (製品出荷日から1年と30日間)

シール貼付欄

株式会社 **オーラルケア** 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-32-9

保証規約

1. 保証の範囲

本製品が保証期間内に本取扱説明書に則って適切に使用されているときに、破損もしくは不具合が発生した場合、本保証書に基づき修理または交換を無償でいたします。

2. 保証期間

製品出荷日から1年と30日間です。

3. 保証対象外

以下の事項に該当する場合は、保証の対象外とさせていただきます。

- ◎ ルーペ部分の破損
- ◎ 消耗品 (スウェットパッド・レザバンド等)
- ◎ 使用上の誤り、または不当な改造・分解による故障・損傷
- ◎ 弊社または弊社指定の修理業者以外で修理・改造が行なわれた製品
- ◎ 水濡れ・衝撃・落下等による破損
- ◎ 火災・公害および地震・雷・風水害、その他天変地異等、外部要因による故障・損傷