

SurgiTel[®]



サージテル ワイヤレス LED ライトシステム ユーザーズガイド

 Oral Care

このたびは、サージテル製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

- ご使用の前に必ずこの『ユーザーズガイド』をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
- 本書は、製品と一緒に大切に保管してください。

このガイドでは誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
次の表示で区分して説明しております。



禁止

製品の取り扱いにおいて
その行為を禁止。



注意

誤った取り扱いをしたときに、
故障・損傷または事故・怪我
に結びつくもの。

目次

サージテル ワイヤレス LED ライトシステム ユーザーズガイド

禁止事項	4
注意事項	5
各部の名称	6
1 バッテリーの取り付け・交換	7
2 ライトの付け外し	8
3 ライトの角度調整	10
4 ライトの点灯／消灯操作	11
5 充電方法	12



主な交換パーツ・アクセサリ	13
修理連絡先・修理品送付先	14
SurgiTel 保証書	15
保証規約	16



禁止

- 光を直接、人の目に当てないでください。紫外線が含まれるため、目に有害な影響を及ぼす可能性があります。
- 不具合が発生した製品をそのまま使用し続けると、重大な事故につながる可能性があります。不具合が起こった際は使用を中止し、カスタマーセンターへご連絡ください。
- 水洗いはしないでください。電気回路のショートや曇りの原因になります。
- 殺菌灯、オートクレーブ、酸・アルカリ洗剤は使わないでください。劣化や損傷の原因になります。



注意

- 車の中など極端に暑い場所、水気の多い場所には置かないでください。極端な暑さ・水分・静電気などは操作パネル誤作動の原因になります。
- バッテリー残量が低下してくると、電圧が低下するため動作が不安定になることがあります。その場合はバッテリーを最後まで使い切らずに早めに交換・充電してください。
- 使用後は、バッテリーをライト本体から取り外して保管してください。
- フル充電したバッテリーを使用しても動作安定性が改善しない場合は、バッテリーと本体の接続端子を柔らかい布でクリーニングしてください。
- ライト点灯中は高温になります。ライトヘッド部に触れたり可燃物の上に置いたりしないようにしてください。
- バッテリーは使用時間に応じて消耗・劣化していきます。寿命を過ぎたバッテリーは不具合が起きる可能性があるため、使用しないでください。
- バッテリーは長期間使用しないと劣化する可能性があります。
- 分解・改造および弊社指定機関以外で修理された製品の故障または損害について、弊社は一切責任を負いかねます。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



その他内容物			
充電スタンド	充電バッテリー (3本)	USB 電源コード	六角レンチ (0.05インチ)
			


梱包箱を開いたら、付属品がそろっていることをご確認ください。

1 バッテリーの取り付け・交換

ライト本体にバッテリーを差し込み、軽く押しながら矢印の方向に回していきます。
取り外す際は逆の向きに回します。

POINT

バッテリーは3個入っているので、充電中でも交換用バッテリーを使って診療を続けることができます。
バッテリーは使わないと劣化してしまうので、交互に使うようにしてください。

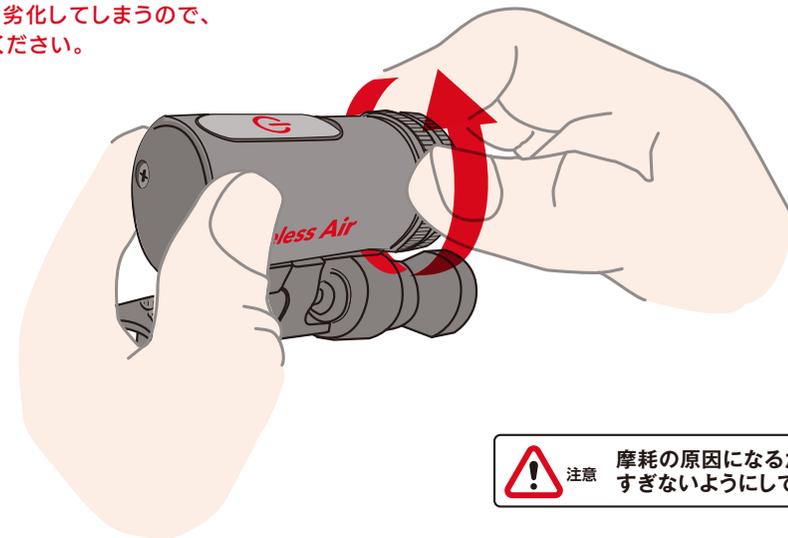



 注意 摩耗の原因になるため、硬く締めすぎないようにしてください。

2 ライトの付け外し

取り付け

ルーペの瞳孔間距離調整ダイヤル部に
ライトマウントを差し込んでください。



※ 付け外しの際はこの部分(ヒンジ)を持つ

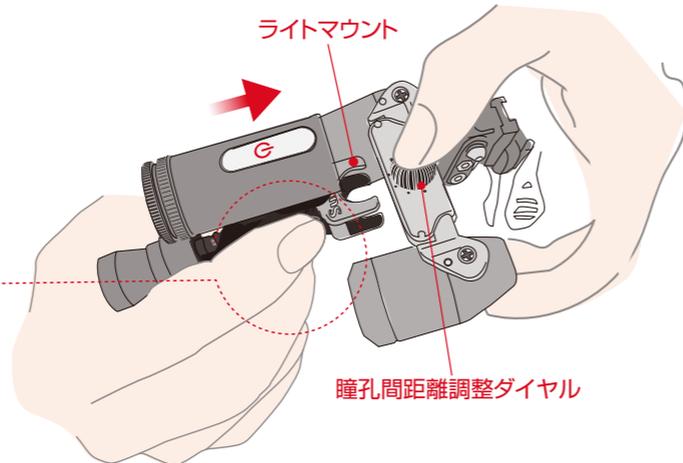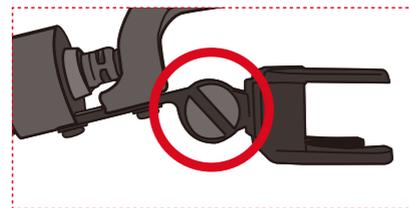

注意 ヒンジ部以外をつかんで取り付けると強い負荷がかかり、折れる
可能性があります。必ずヒンジ部を持って取り付けてください。

取り外し

取り付け時と同様に、片手でワイヤレス
ライトのヒンジ部をつかみ、もう片方の手で
ルーペの瞳孔間距離調整ダイヤル部を
持って引き抜いてください。

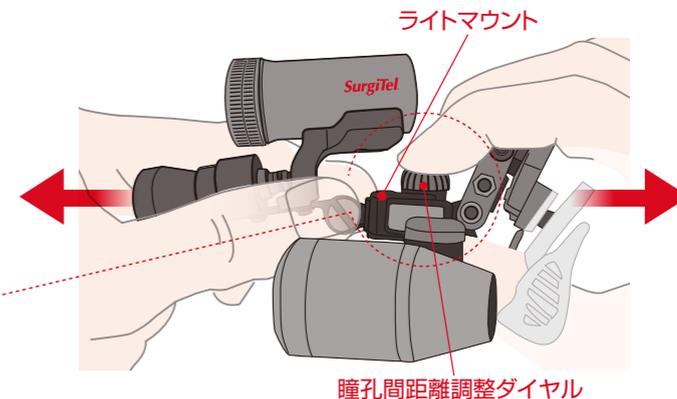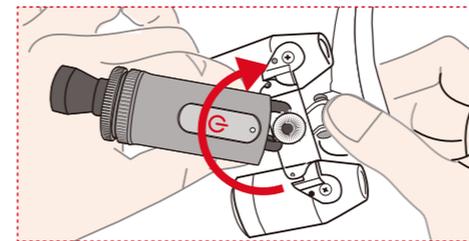


※ ライトマウントを図のように持ち、瞳孔間距離調整ダイヤル
を軸に横へスライドさせて取り外してください。



注意

バッテリーボックスをつかんで
引っ張ると強い負荷がかかり、
折れる可能性があります。
バッテリーボックスではなく、
ヒンジ部を持って取り外してく
ださい。

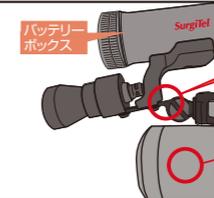



この部分が特に繊細な作りとなっており、ヒンジ
部以外を持って取り付けや取り外しを行なった
場合、折れてしまう可能性が非常に高いです。

鏡筒を持つと、視野角がずれる可能性があるので
注意してください。

3 ライトの角度調整


ルーペの視野にライトの明かりが当たるよう角度を調整してください。

※ 左右には動きません。

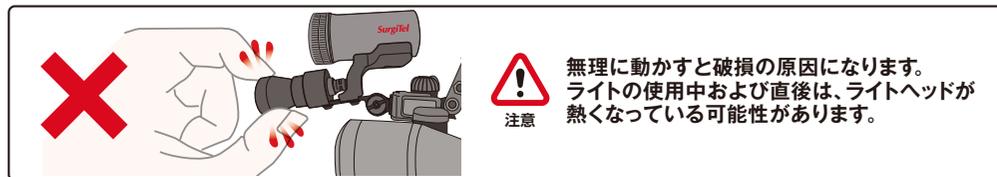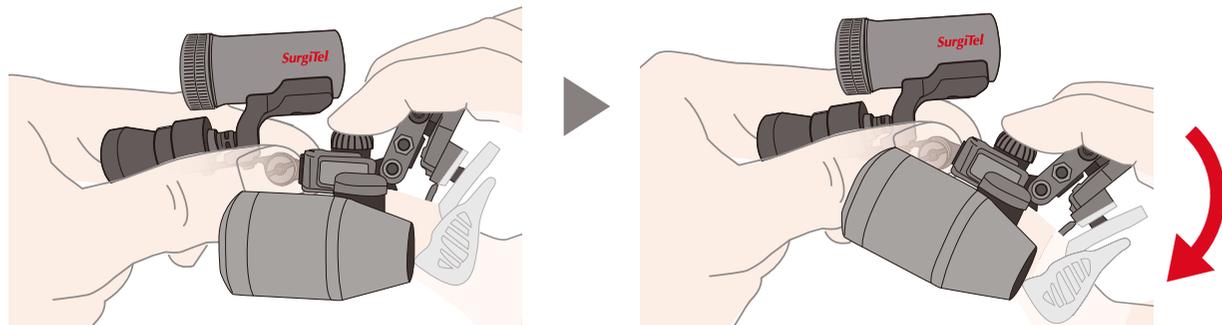


4 ライトの点灯／消灯操作

⏻ を1回押すと点灯状態になり、もう1回押すと消灯状態になります。

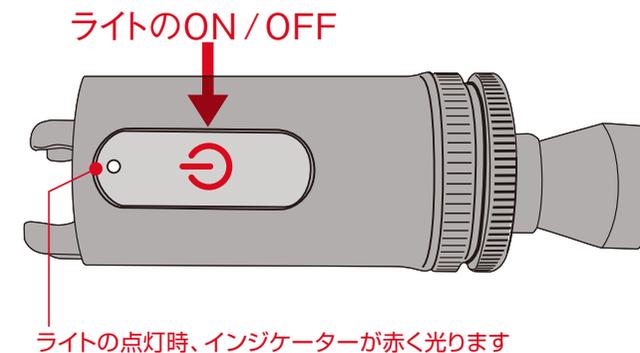


5 充電方法

- ① 充電スタンドとUSB電源コードをつなぎ、USBアダプターをコンセントに差し込みます。

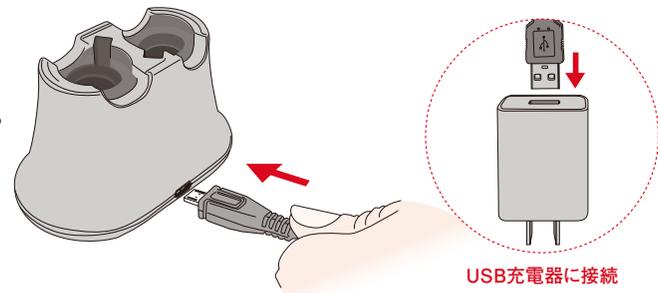

- ② 充電スタンドにバッテリーを差し込み、上から軽く押すとバッテリーが固定され、充電が始まります。充電中は青いランプが点滅します。充電が完了すると、青いランプが点灯したままになります。バッテリーを上から軽く押し取り外してください。

※バッテリー(3個)は交互にお使いください。

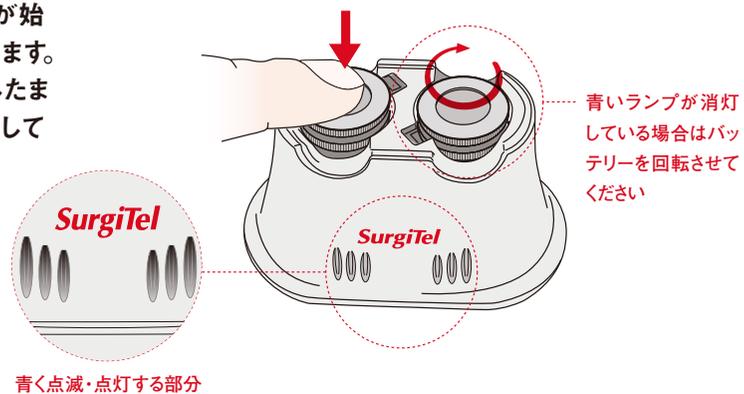

<p>交換用 充電バッテリー</p> <p>3本セット</p>	<p>交換用 充電バッテリー</p> <p>1本</p>	<p>ライトマウントキット</p>
<p>充電スタンド</p>	<p>USB 電源コード</p>	

Webサイトからご注文いただけます。



【製品仕様】

製品名	明るさ (作業距離35cm)	充電時間	照射時間
Wireless Air Micro Odyssey (ワイヤレス エア マイクロ オデッセイ)	22,000ルクス	約1時間	約1時間20分

〈セット内容〉 ヘッドライト本体、充電バッテリー×3、USB電源コード、充電スタンド、六角レンチ

【保証期間内】

株式会社オーラルケア サージテル修理チーム

〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西4-21-3

Tel: 0120-149-386 Fax: 0120-449-386 email: surgitel_repair@oralcare.co.jp

【保証期間終了後】

株式会社マグニファイ・フューチャー・コミュニケーション サージテルリペアサービス

〒125-0062 東京都葛飾区青戸5-9-6-102

Tel: 03-6662-4901 Fax: 03-6662-4903 email: surgitel-repair@mf-communication.com

株式会社オーラルケア サージテル・カスタマーセンター

☎0120-149-386 ☎0120-449-386

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9 ✉surgitel@oralcare.co.jp

LINE 登録はこちら
LINE ID: @surgitel



 Oral Care
<https://www.oralcare.co.jp>

SurgiTel® 保証書

ご購入医院名

お名前

製品出荷日

年

月

日

保証期間 1年 (製品出荷日から1年と30日間)

シール貼付欄

株式会社 **オーラルケア** 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9

保証規約

1. 保証の範囲

保証期間内に弊社側の責任による不具合が生じた場合、本保証規約に基づき修理または交換を無償でいたします。

2. 保証期間

製品出荷日から1年と30日間です。

3. 保証対象外

以下の事項に該当する場合は、保証の対象外となります。

- ◎ 消耗品(ライトマウント類・充電バッテリー)
- ◎ 使用上の誤り、または不当な改造・分解による故障・損傷
- ◎ 弊社または弊社指定の修理業者以外で修理・改造が行なわれた製品
- ◎ 水濡れ・衝撃・落下等による破損
- ◎ 火災・公害および地震・雷・風水害、その他天変地異等、外部要因による故障・損傷